




NÁVOD K POUŽITÍ

OP OPTIKA, NÁSTAVEC

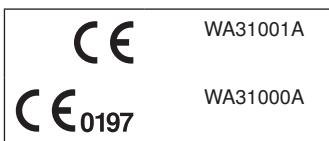

Obsah

1 Obecné informace.....	5
1.1 Výrobce	6
2 Po obdržení zařízení	7
3 Terminologie.....	8
4 Technické údaje	9
5 Kompatibilní komponenty	10
6 Před použitím	12
6.1 Kontrola a testování	12
7 Použití	14
7.1 Příprava.....	14
7.2 Výkon	16
7.3 Po použití	18
8 Dekontaminace.....	19
8.1 Čištění	21
8.2 Údržba.....	21
9 Oprava.....	22

1 Obecné informace

Určené použití

WA31000A

OP optika se používá uvnitř močového měchýře v kombinaci s kompatibilními tkáňovými morcelátory a ručními nástroji.

WA31001A

Nástavec pro použití s OP optikou WA31000A.

- Nepoužívejte je k jiným účelům.

Použití ve zdravotnictví

Tento výrobek je určen výhradně pro použití ve zdravotnických zařízeních, a to vyškoleným zdravotnickým personálem.

POZNÁMKA

Sada návodů k použití

Kompletní sada návodů k použití pro tento výrobek se skládá z tohoto návodu k používání specifického výrobku a z uživatelské příručky k systému „Průvodce systémem endoskopie“. Pokud vám některý návod k použití chybí nebo jej ztratíte, okamžitě kontaktujte zástupce společnosti Olympus. Ponechte tento návod k použití na bezpečném, přístupném místě.



VAROVÁNÍ

Pečlivě si přečtěte všechny návody k použití

Před použitím si přečtěte tento návod, Průvodce systémem endoskopie a návody všech ostatních zařízení, která budete při výkonu používat. Nedostatečné pochopení nebezpečí, varování, upozornění a informací v těchto návodech může zapříčinit smrt, vážná poranění nebo poškození zařízení.

Evropská směrnice pro zdravotnické prostředky

Tento výrobek odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EHS, která se vztahuje na prostředky používané ve zdravotnictví.

1.1 Výrobce



Olympus Winter & Ibe GmbH
Kuehnstr. 61
22045 Hamburg
Německo

2 Po obdržení zařízení

Okamžitě zkontrolujte

- Ujistěte se, že přepravní kufrík obsahuje všechny níže uvedené položky.
- Pokud některé položky chybí nebo jsou poškozeny, kontaktujte zástupce společnosti Olympus nebo autorizované servisní centrum.

Obsah WA31000A


- OP optika
- Nástavec WA31001A
- Těsnicí čepičky A5857
- Ventily A4559
- Návod k použití
- Průvodce systémem endoskopie

Obsah WA31001A

- Nástavec WA31001A
- List s informacemi o přístupu

3 Terminologie

OP optika

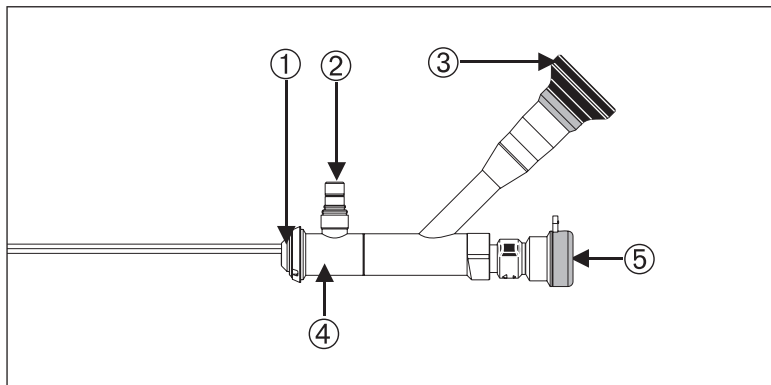

- 1) Pojistný kužel
- 2) Konektor pro světlovodný kabel
- 3) Trychtýřový nástavec okuláru
- 4) Pracovní kanál
- 5) Těsnicí čepička

4 Technické údaje

Optika

Průměr pracovního kanálu 5 mm

Směr pohledu.....0°

5 Kompatibilní komponenty




VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění pacienta a/nebo uživatele


Používejte pouze kompatibilní zařízení, která jsou uvedena v této části.

Pokud použijete jiné kombinace, plná odpovědnost je na uživateli.

Výrobky uvedené do provozu později mohou být také kompatibilní. Další podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Olympus.

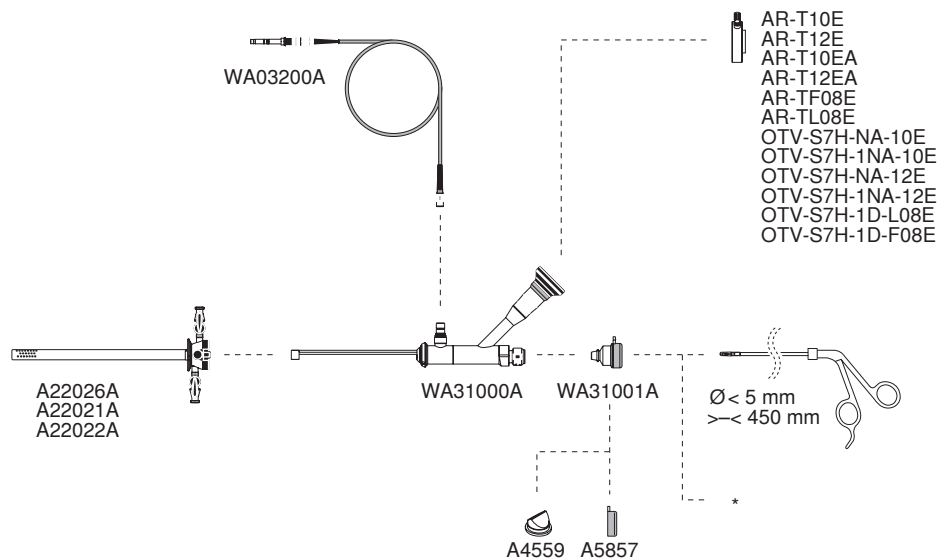

*Tkáňový morcelátor Ø 5 mm

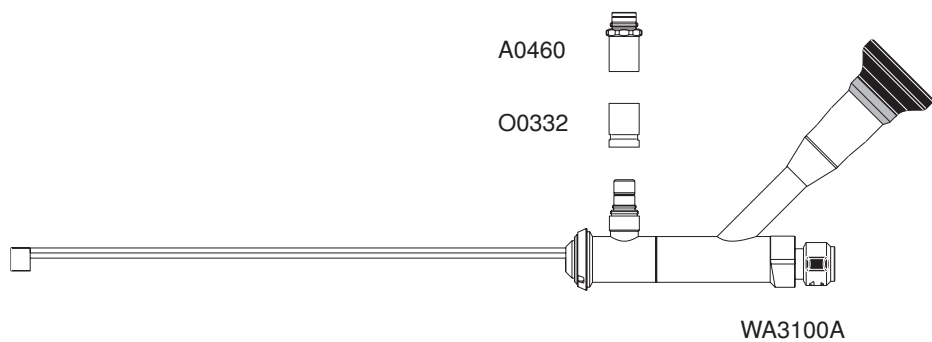

6 Před použitím



VAROVÁNÍ

Nebezpečí přenosu infekce

Výrobek před prvním a před každým dalším použitím důkladně dekontaminujte, a to dle instrukcí uvedených v tomto návodu a v návodu Průvodce systémem endoskopie.

Nesprávná a/nebo neúplná dekontaminace může zapříčinit infekci pacienta a/nebo zdravotnického personálu.




UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození nástroje

Tato optika je precizní optické zařízení. S tímto výrobkem vždy zacházejte s maximální péčí.

6.1 Kontrola a testování

Kontrola výrobku

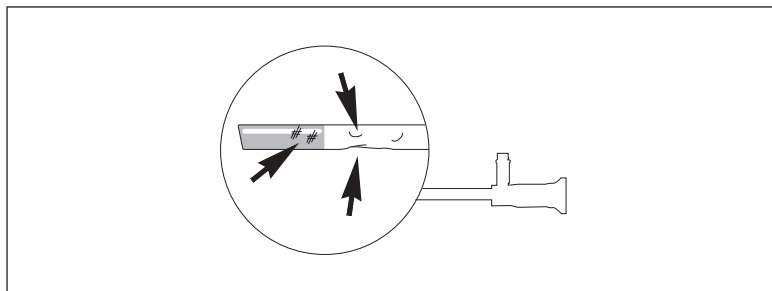

Pohledem zkontrolujte výrobek. Ujistěte se, že:

- nejeví známky koroze,
- není promáčknut,
- není poškrábán.
- Ujistěte se, že těsnicí čepička není poškozena.
- Ověřte, že ventil není poškozen.

Zkontrolujte kvalitu obrazu

Kousek psaného dokumentu, který držíte přibližně 10 mm od čoček objektivu, musí být přes optiku jasně viditelný.

Poškozený výrobek

Pokud je výrobek poškozen nebo nefunguje správně, kontaktujte zástupce společnosti Olympus nebo autorizované servisní centrum.


7 Použití

Před použitím

Ujistěte se, že výrobek byl správně dekontaminován, zkontrolován a otestován.


7.1 Příprava

Světlovodný kabel

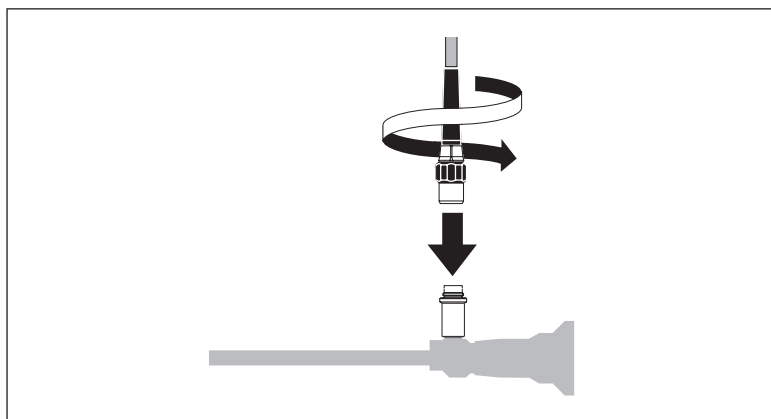

- Připojte konektor pro světlovodný kabel na optice ke kompatibilnímu světlovodnému kabelu společnosti Olympus.
- Světlovodný kabel připojte ke kompatibilnímu světelnému zdroji společnosti Olympus.

Adaptéry na konektoru pro světlovodný kabel

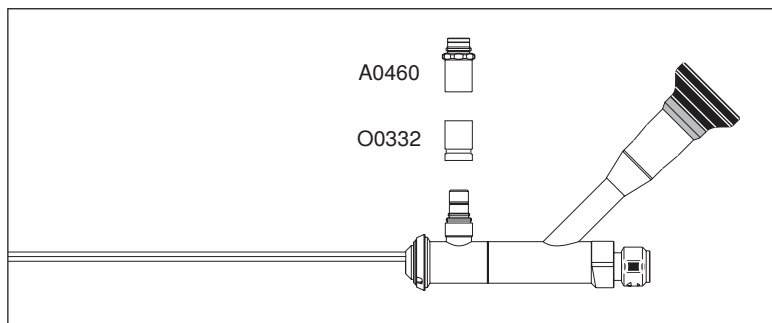

Adaptéry světlovodů A0460 a O0332 umožňují, aby byla optika připojena ke světlovodným kabelům různých výrobců. Společnost Olympus doporučuje používat světlovodné kabely Olympus a světelné zdroje Olympus. Pouze tato kombinace zaručí optimální osvětlení endoskopického obrazu a výbornou barevnou reprodukci.



VAROVÁNÍ

Poranění a poškození působením tepla

Světelné zdroje emitují velké množství energie.


Důsledkem je:

- konektor pro světlovodný kabel a distální konec optiky se stanou extrémně horkými,
- světelná energie se koncentruje na relativně malé ploše.

Nebezpečí:

- tepelné poranění pacientovy tkáně (např. při prodloužené expozici při intenzivním osvětlení v dutinách s malými lumeny nebo když je distální konec optiky umístěn velice blízko u tkáně),
- popáleniny kůže pacienta nebo uživatele,
- propálení nebo tepelné poškození chirurgického zařízení (např. chirurgických roušek, plastového materiálu atd.).

Protiopatření:

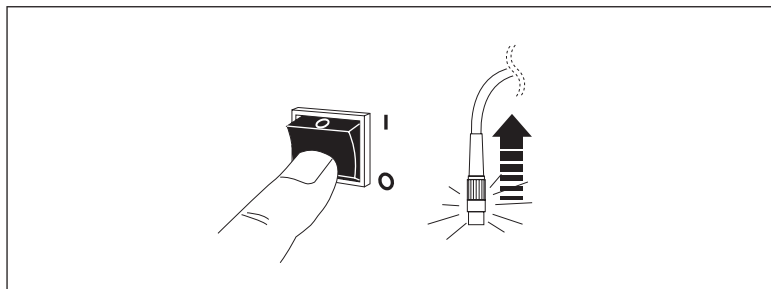


- vyhněte se prodloužené expozici při intenzivním osvětlení,
- použijte minimální hladinu osvětlení potřebnou k uspokojivému osvětlení cílové tkáně,
- nepokládejte distální konec optiky nebo konektor pro světlovodný kabel na kůži pacienta, na hořlavý materiál nebo na materiál citlivý na teplo,
- nedotýkejte se distálního konce optiky nebo konektoru pro světlovodný kabel,
- vypněte světelný zdroj, když odpojíte optiku od světlovodného kabelu,
- po použití ponechte optiku a světlovodný kabel vychladnout.

7.2 Výkon

Zaved'te plášť


- Zaved'te kompatibilní zevní plášť do uretry. Prostudujte si návod k použití zevního pláště.

Zavedení optiky

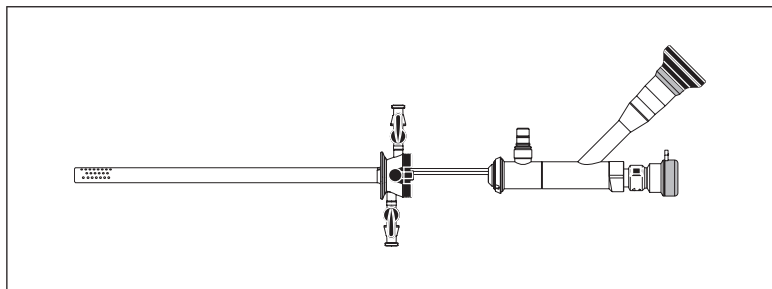

- Zaveďte optiku do zevního pláště.
- Zatlačte optiku do zevního pláště tak, aby zapadla do své pozice. Pokud optika ihned nezapadne do své pozice, jemně jí otáčejte.

Připojení videoadaptéru

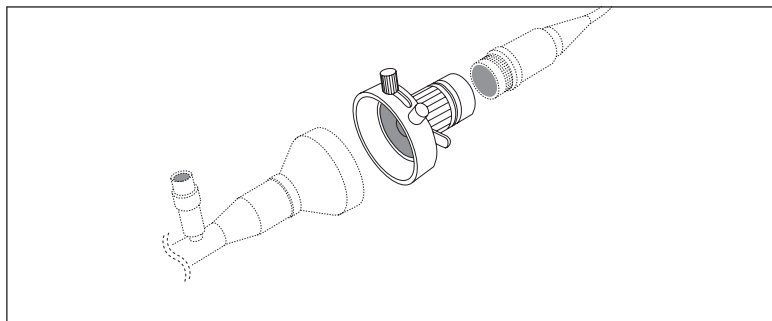

- Zvolte kompatibilní videoadaptér.
- Připojte videoadaptér k hlavě kamery.
- Připojte videoadaptér k trychtýřovému nastavci okuláru optiky.
- Prostudujte si návod k použití videoadaptéru.

POZNÁMKA

Užití jako součást cystoskopu

OP optiku a kompatibilní zevní plášť lze používat jako součást cystoskopu (kompatibilní zevní pláště naleznete v kapitole „Kompatibilní komponenty“).

V tomto případě lze použít přítokový a odtokový ventil zevního pláště pouze jako přítokové ventily.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí poškození močového měchýře

Při použití OP optiky společně s morcelátorem se ujistěte, že přítok do močového měchýře je dostatečný (viz návod k použití morcelátoru).

Ujistěte se, že přítok je alespoň 1 400 ml/min. Dosáhnete toho

- zavěšením sáček s irigačním roztokem do výšky alespoň 1,5 m nad pacientem,
- používejte pouze hadičky s minimálním vnitřním průměrem 5 mm,
- použijte oba uzavírací ventily zevního pláště jako přítokové. Nedostatečný přítok irigačního roztoku může mít za následek kolaps močového měchýře a následné riziko poranění.

Zavedení morcelátoru

- Ujistěte se, že kompatibilní ventil a těsnicí čepička jsou uchyceny k nástavci.
- Zaveďte kompatibilní morcelátor přes těsnicí čepičku do pracovního kanálu OP optiky.

Výkon

- Provedte výkon.

7.3 Po použití

Vytažení nástroje

- Vytáhněte morcelátor z optiky.
- Uzavřete uzavírací kohoutek pro irigaci.
- Vytáhněte zevní plášť a optiku z pacienta.

Příprava na dekontaminaci v místě použití

- Okamžitě přeneste výrobek na místo určené pro dekontaminaci.
- Výrobek dekontaminujte podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití a v návodu Průvodce systémem endoskopie.

8 Dekontaminace



VAROVÁNÍ

Nebezpečí přenosu infekce

Výrobek před prvním a před každým dalším použitím důkladně dekontaminujte, a to dle instrukcí uvedených v tomto návodu a v návodu Průvodce systémem endoskopie.

Nesprávná a/nebo neúplná dekontaminace může zapříčinit infekci pacienta a/nebo zdravotnického personálu.

Řiďte se následujícími instrukcemi specifickými pro výrobek.

Informace v této části

Následující informace o dekontaminaci doplňují příslušné informace uvedené v návodu Průvodce systémem endoskopie. Pokud se však informace uvedené v této části liší od informací uvedených v návodu Průvodce systémem endoskopie, řiďte se informacemi uvedenými zde.

Kompatibilní metody dekontaminace (dle normy ISO 17664)

U tohoto výrobku byla schválena a ověřena mikrobiologická účinnost a/nebo kompatibilita materiálu u metod dekontaminace uvedených v tabulce. Podrobnosti o dekontaminačních postupech jsou uvedeny v Průvodci systémem endoskopie.

- ++ Metoda schválená z hlediska mikrobiologické účinnosti a ověřená z hlediska kompatibility materiálu
- + Metoda ověřená pro kompatibilitu materiálu
- Nekompatibilní
- o Další informace poskytne zástupce firmy Olympus.

Proces				
Příprava v místě použití	Depozice	Vlhká		+
		Suchá		+
Dekontaminace	Příprava	Výběr podle čistících a dezinfekčních postupů		
	Čištění	Ruční		++
		Strojové		++
		Ultrazvukové		–
		Alkalické detergenční činidlo		+
		Kyselé detergenční činidlo		o
		Neutrální detergenční činidlo		+
	Oplachování			+
	Dezinfekce	Chemická		o
		Tepelná		+
	Sušení	T _{max}		95 °C max. 10 min.
Údržba				
Sterilizace	Párou (preferovaná metoda)		Autokláv (prevakuum)	++
	Nízkoteplotní: párou a formaldehydem			+
	Etylenoxidem			+
	Suchým teplem			–
	Tekutý dezinfekční prostředek		Steris System 1	+
	Plynovou plazmou		STERRAD 50/100/100S	+
			STERRAD 200	+
			STERRAD NX	+



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození výrobku

Nepoužívejte nekompatibilní metody dekontaminace. Může dojít k poškození výrobku.

8.1 Čištění

Odpojení adaptéru světlovodu a nástavce

Odpojte adaptéry světlovodu a nástavec pro dekontaminaci.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození optiky

Vždy čistěte každou optiku zvlášť. Nečistěte ji s jinými optikami nebo jinými nástroji.

8.2 Údržba




UPOZORNĚNÍ

Snížení kvality zobrazení

Všechna lubrikační činidla nanášejte uvážlivě. Ujistěte se, že objektiv optiky nebo čočky okuláru nejsou zašpiněny lubrikačním činidlem.


Lubrikační činidla na objektivu nebo na čočkách okuláru významně sníží viditelnost a kvalitu zobrazení.

Těsnicí čepička

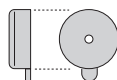

- Při poškození vyměňte těsnicí čepičku za těsnicí čepičku A5857.

Ventil

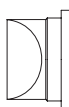

- Při poškození vyměňte ventil za ventil A4559.

9 Oprava

Postup

Ohledně informací o opravách a záruce kontaktujte zástupce společnosti Olympus nebo autorizované servisní centrum.

Směrnice pro provádění oprav

Dodržujte obecné pokyny k provádění oprav, které jsou uvedeny v návodu Průvodce systémem endoskopie.

OLYMPUS



W9215262_00
2017-05-04
cs

© Copyright 2017 Olympus Winter & Ibe GmbH