

FILOZOFIE

AVE Z LATINSKÉHO SLOVA „VÍTEJ“ NA SVĚT

Porodní postel AVE svou koncepcí spojuje
individuální požadavky rodičky na komfort a pohodlí
s profesionálními potřebami porodního týmu,
s důrazem na estetický a funkční design celého výrobku.



POCIT BEZPEČÍ



SVOBODA VOLBY PORODNÍ POLOHY



RESPEKTOVÁNÍ POTŘEB RODIČKY




BLÍZKOST MATKY A DÍTĚTE

DESIGN

VÝJIMEČNÝ A FUNKČNÍ DESIGN

respektuje principy porodnictví,
obsluhujícího personálu
a samotné rodičky.

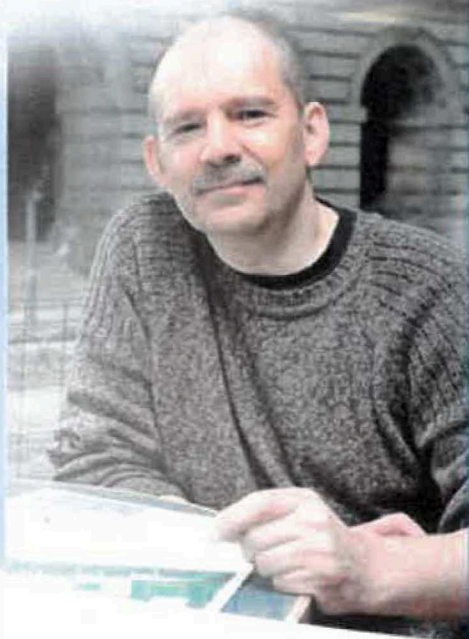


AUTOREM

designu je Jiří Španihel

Každé nové věci
předchází vývoj...

OCENĚNÍ ZA DESIGN
udělované Design centrem CZ

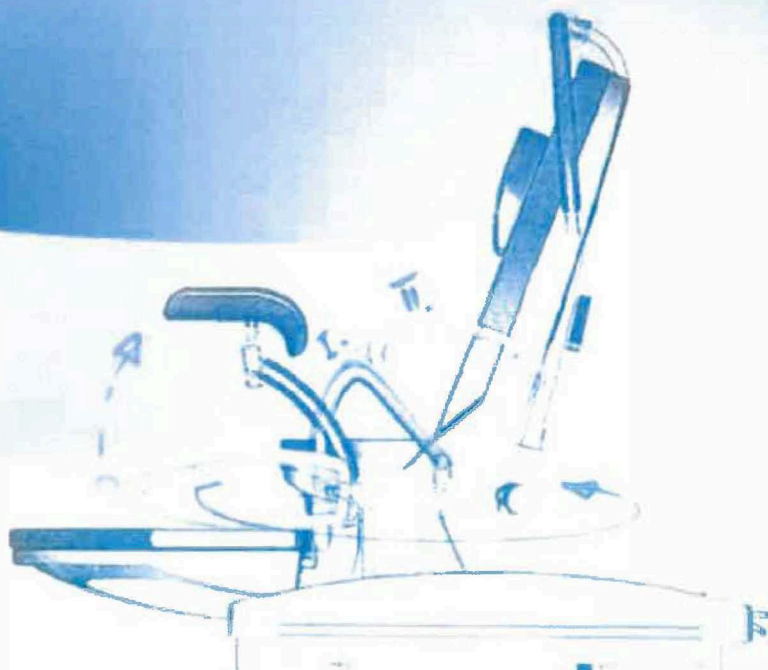



INOVACE



ZASUNUTÍ
PODNOŽNÍHO DÍLU
bez nutnosti
jeho odnímání.



PODNOŽNÍ DÍL

Zasunutím podnožního dílu vytvoříte prostor pro práci personálu. Odpadá nutnost tento díl z postele odnímat, čímž zabráňujeme zranění zad personálu při manipulaci.

Ovládání je jednoduché a rychlé. Vysunutím podnožního dílu rychle přenastavíte AVE do horizontální polohy, kde využijete vysokou nosnost dílu a širokou a komfortní plochu jako podložku pro dítě. Při vyklopení vám tento díl poslouží i jako podpěra nohou.

Originální řešení
BORCAD



PODPĚRY NOHOU

Koncepce podpěr nohou je originálním řešením firmy BORCAD. Umožňuje velmi rychlé nastavení podpěr do požadované polohy. Toto řešení umožňuje personálu efektivně reagovat na vzniklé situace během porodu.

V nabídce je také verze dělitelných podpěr, kdy Vám po odejmutí stále zůstane na posteli úchyt pro ruce.



RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ
MANIPULACE

ÚCHYTY PRO RUCE

Zvyšují komfort rodičky ve druhé době porodní.



MASÁŽNÍ SEGMENT

Masážní segment zmírňuje rodičce bolesti a přispívá ke zvýšení klidu a pohodlí před samotným porodem. Masáž je možno si navolit ve dvou rychlostních stupních.

Díky jednoduchému a pohodlnému ovládání si masáž může uvést do chodu i sama rodička.



LORDÓZNÍ OPĚRA

Plynule nastavitelné vyklenutí lordózní opěry vyhoví specifickým potřebám každé rodičky a umožňuje zmírnění jejich bolestí při první době porodní.

Eliminuje nutnost používání přídavných podložek a polštářků.



JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

NÍZKÁ NÁSTUPNÍ VÝŠKA

Velmi nízká nástupní výška porodní postele (včetně matrace) 600 mm umožňuje i malé rodičce pohodlné nastoupení a zároveň usnadňuje práci pro nižší sestru.

BEZDRÁTOVÝ NOŽNÍ OVLADAČ

Sedací a zádový díl, stejně jako výškové nastavení postele lze ovládat bezdrátovým nožním ovladačem. Díky WiFi řešení jej lze přemístit kdekoliv v místnosti, aniž by Vás omezovala kabeláž. Ovladač signalizuje stav baterie a má dosah až 10 metrů.



HYGIENA BEZ KOMPROMISU

SNADNÁ ČISTITELNOST

Kompaktní konstrukce dílů ložné plochy a plastový kryt podvozku snižují čas potřebný k čištění postele. Konstrukce porodní postele je bez skřípných míst a ostrých hran, což zvyšuje bezpečnost obsluhujícího personálu.

1. Antibakteriální koženka
2. Bezešvé polstrování
3. Kompaktní a uzavřená plocha



BEZPEČNOST



1. Boční zábrany
2. Široká ložná plocha
3. Absence ostrých hran
4. Jednoznačná fixace ovládacích prvků
5. Nízká nástupní výška
6. Absence střizných míst
7. Robustní konstrukce



8. Protišoková poloha

CÍTIT SE
PŘIROZENĚ





ANO PŘIROZENÝM PORODŮM

„Celospolečenské úsilí by mělo vést k tomu, že se prostředí v porodnicích bude zlidšťovat. Je zde obrovský prostor pro uplatnění porodních asistentek. Dovedu si představit, že jednou drtivá většina porodů proběhne pod dohledem porodní asistentky, pracující pouze v zajištěném prostředí a mající lékaře někde poblíž, ihned k dispozici. To je cesta. Je zbytečné, aby každý fyziologický porod vedl lékař. Není ale zbytečné, aby každý porod probíhal v nemocnici. Anebo chcete-li, v bezpečném prostředí.“



MUDr. Petr Velebil, CSc.

Primář porodnických oddělení v ÚPMD v Podolí,
místopředseda Sekce perinatální medicíny ČGPS
Pracoval v Centers for Disease Control (USA)
a jako gynekolog na soukromé klinice
Canadian Medical Care

PORODNÍ POLOHY



S použitím bohatého příslušenství porodní postele AVE je možné vedení porodu klasickým nebo alternativním způsobem.





PŘÍSLUŠENSTVÍ



PPA-29-X Hrazda čalouněná s 2 fixačními klouby



PPA-33 Miska velká, nerezová – 10 l



PPA-535 Podsvětlení postele




PPA-36 Stojan infuzní nerezový, teleskopický



PPA48.21 Nožní ovladač




PPA-556 Bezdrátový nožní ovladač

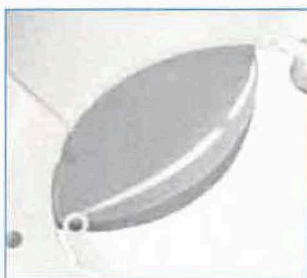

PPA-65 Miska odkládací plastová




PPA-083 Miska instrumentální

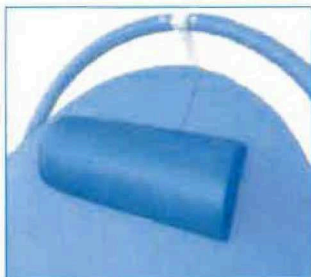

PPA-70-X Podhlavník pūkulaý



PPA-128.X Podhlavník

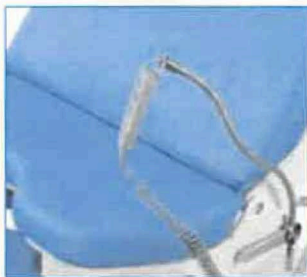

PPA-71 Držák ovládače



ZK-05.X lékařská židlička



GKB-076 lékař ergonom. židle nastavitelná nohou



PPA-00.37 Boční zábrana bez čalounění – pár



PPA-00.35-X Boční zábrana s čalouněním – pár



PPA-00.36-X Dvojitá boční zábrana s čalouněním – pár

BAREVNÁ PROVEDENÍ



M – Kukuřičově žlutá



T – Růžová



F – Oceánově zelená



B – Brilantově modrá



P – Oranžová

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY

Celková délka v rozloženém stavu	2 100 mm
Celková šířka (bez kloubů)	1 016 mm
Minimální výška včetně polstrů	600 mm
Šířka matrace	960 mm

MANUÁLNÍ NASTAVOVÁNÍ

Úhel nastavení podnožního dílu	0° - 25°
Výškové nastavení podnožního dílu	225 mm
Půdorysné vysunutí podnožního dílu	+0°, 60°, 90°

ELEKTRONICKÉ NASTAVOVÁNÍ

Maximální zdvih výškového nastavení	295 mm
Úhel nastavení zádového dílu	-12° / +70°
Úhel nastavení sedacího dílu	0° / +20°

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Akumulátory záložní	1,3 Ah
Napájení	100-230 V
Frekvence	50/60 Hz
Druh ochrany	BF
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany	IP X4



STANDARDNÍ VÝBAVA

- standardní držáky nohou (pár) dle výběru
- zasouvateľná nerezová 4,5l miska / plastová 8l miska
- úchyty pro ruce (pár)
- kolečka 125 mm, 1x směrové
- dálkový ruční ovladač
- centrální brzda
- háček na uchycení ovladače na obou stranách postele
- držák infuzního stojanu na obou stranách postele
- zasouvateľný podnožní díl včetně čalounění
- ekvipotencionální svorka
- matrace s antibakteriální koženkou
- elektrický a manuální trendelenburg
- bezešvé provedení polstrování
- síťový kabel dle výběru
- eurolišty na obou stranách sedáku
- výběr ze 4 barevných verzí
- podhlavník
- balení
- madlo zad s čalouněním / bez čalounění
- záložní baterie

REFERENCE

BORCAD exportuje do více jak 80 zemí světa. Nechte se inspirovat z vybraných referenčních pracovišť, která již využívají přidanou hodnotu naší porodní postele AVE

ČESKÁ REPUBLIKA	FN Motol, Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD - Podolí), Praha
POLSKO	Szpital Chórzow, Kraków, Warszawa, Oświęcim, Tarnów
NĚMECKO	Mnichov, Klinikum Rechts der Isar
INDONÉSIE	Surabaya National Hospital
SLOVENSKO	Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
ŠVÝCARSKO	Hirslanden Klinik St. Anna AG
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY	Life Line Hospital
RUSKO	Programma modernizacii zdravoochranija v Kostromskoj oblasti
MAĎARSKO	Petz Aladár Megyei Oktatókórház
BULHARSKO	SIA „Maichin Dom“
KAZACHSTÁN	Keruen-Medicus, TOO
LOTYŠSKO	SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca“
PERU	Instituto Nacional Materno Perinatal
THAJSKO	Rajavithi Hospital
SLOVINSKO	UKC Maribor
ITÁLIE	Ospedale Buzzi, Milano
FRANCIE	Clinique de l'Anjou
ŠPANĚLSKO	Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid)
RAKOUSKO	O.Ö Gesundheits- u. Spitals-AG Landeskrankenhaus Freistadt
EKVÁDOR	Security Social Hospital, Santo Domingo City and Babahoyo City
SAUDSKÁ ARÁBIE	King Saud Medical City, Maternity Hospital, Riyadh
MEXICO	Hospital Angeles Acoxpa, Mexico City
TURECKO	Medipol Üniversitesi Hastanesi, Kolan Hospital Group, Acibadem Hospital Group
ANGLIE	Guy's & St Thomas' NHS Foundation Trust





BORCAD Medical a.s.

Fryčovice 673
739 45
Česká republika

tel.: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
www.borcadmedical.com



Výrobek odpovídá evropským standardům
EN 60601-1 a EN 60601-2



Pro bližší informace kontaktujte společnost na telefonní číslo uvedené v seznamu.

